

POWER SETTINGS - TABLE-TOP DEVICES / TABLEAU DE REGLAGES - APPAREILS DE TABLE

	Tips / Inserts	NEWTRON® BOOSTER NEWTRON® P5 NEWTRON® P5XS	PMax XS P5 NEWTRON® P5 NEWTRON® XS	SUPRASSON PMax PROPHY MAX	P5 BOOSTER	PIEZOTOME®* IMPLANT CENTER™* PIEZOTOME®2* IMPLANT CENTER™2*	IRRIGATION
PROPHYLAXIS PROPHYLAXIE	1 / 2 / 3 / 1S	14	14	5	10	5	↕
	10P	14	14	5	10	5	↕
	10X / 10Z	12	12	2	9	2	↕
	EX1 / EX2 / EX3 / EXL / EXR	12	12	2	9	2	↕
PERIODONTICS PARODONTIE	H1 / H2L / H2R / H3 / H4L / H4R	2	2	2	1	2	↕
	P2L / P2R	3	3	3	2	3	↕
	TK1-1S	2	2	2	1	2	↕
	TK1-1L / TK2-1L / TK2-1R	2	2	2	1	2	↕
IMPLANT CARE SOINS DE L'IMPLANT	PH1 / PH2L / PH2R	2	2	3	2	3	↕
	IP1	3	3	3	N/A	3	↕
	IP2L / IP2R / IP3L / IP3R	5	5	4	N/A	4	↕
ENDODONTICS ENDODONTIE	CAP1	10	10	6	7	6	↕
	CAP2 / CAP3	10	10	6	7	6	↕
	ET18D	10	10	6	7	6	↕
	ET20 / ET25 / ET25S / ETBD	7	7	3	5	3	↕
	ET20D / ET25L / ET40 / ET40D	7	7	3	5	3	↕
	IRR20-21 / IRR20-25 / IRR25-21 / IRR25-25	6	6	1	4	1	↕
	K10 / K15 / K25 / K30	6	6	1	4	1	↕
	AS3D / AS6D	7	7	3	5	3	↕
	AS9D	6	6	1	4	1	↕
	ASLD / ASRD	7	7	3	5	3	↕
	P14D / S12-70D	7	7	3	5	3	↕
	P15LD / P15RD	7	7	3	5	3	↕
	SO4	7	7	3	5	3	✕
PROSTHESIS & ESTHETICS PROTHESES & ESTHETIQUE	PM1 / PMS1	15	15	6	11	6	↕
	PM2 / PMS2	10	10	6	7	6	↕
	PM3 / PMS3	8	8	4	6	4	↕
	PM4	15	15	5	10	5	↕
	PMV1 / PMV2 / PMV3	15	15	5	10	5	↕
	PMV4 / PMV5 / PMV6	10	10	6	7	6	↕
	5AE / ETPR	20	20	10	14	10	↕
	C20	11	11	1	8	1	✕

*Medical devices equipped with Newtron® handpiece and used in Newtron® mode / Dispositifs médicaux équipés d'une pièce à main Newtron®, à utiliser en mode Newtron®

Power Modes / Modes de Puissance

NEWTRON® : Low / Basse - Medium / Moyenne - High / Haute - Very high / Très haute

Power Settings Scale / Echelle de Réglages

NEWTRON® BOOSTER / NEWTRON® P5 / NEWTRON® P5XS / P5 NEWTRON® (LED) / P5 XS NEWTRON® (LED) / P-Max XS / IMPLANT CENTER™ CUBE : from 1 to 20 depending on clinical range / de 1 à 20, couvre toutes les gammes

SUPRASSON P-Max / PROPHY Max / PIEZOTOME® / IMPLANT CENTER™ / PIEZOTOME® 2 / IMPLANT CENTER™ 2 : from 1 to 10 in each clinical range / de 1 à 10 dans chaque gamme

P5 BOOSTER : from 1 to 14 depending on clinical range / de 1 à 14, couvre toutes les gammes





















See individual medical device instructions manuals for further informations on satelec.com/documents.

Lire attentivement le manuel d'utilisation du dispositif médical, pour de plus amples informations sur satelec.com/documents.



www.youtube.com/user/acteon_satelec



PROPHYLAXIS PROPHYLAXIE 	Scaling Détartrage						
	Hygiene Hygiène						
	Excavus						
PERIODONTICS PARODONTIE 	Periodontics Parodontie						
	Periomaintenance BDR						
	PerioPrecision						
IMPLANT CARE SOINS DE L'IMPLANT 	PerioSoft						
	ImplantProtect						
ENDODONTICS ENDODONTIE 	Endosuccess Canal Access Prep						
	Endosuccess Retreatment						
	IrriSafe K Files / Limes K						
	Endodontics Endodontie						
							
	Endosuccess Apical Surgery						
Endosurgery							
PROSTHESIS & ESTHETICS PROTHÈSES & ESTHÉTIQUE 	PerfectMargin Rounded						
	PerfectMargin Shoulder						
	PerfectMargin Veneers						
	Loosening & Condensation Descellement & Condensation			