

3,5 Min 134°C / 15 Min 121°C

**Instructions for use**  
Place the indicator inside each pack to be sterilised. Colour changes to green after successful steam sterilisation cycle.

**Modo de empleo:**  
Coloque el indicador en el interior de cada paquete a esterilizar. El color cambia a verde después de un ciclo de esterilización con vapor estéril.

**Mode d'emploi:**  
Placez l'indicateur à l'intérieur de chaque sachet à stériliser. La couleur passe au vert si le cycle de stérilisation a été réalisé avec succès.

**Gebrauchsanweisung:**  
Platzieren Sie den Indikator innerhalb der zu sterilisierenden Verpackung. Farbe wechselt auf grün nach erfolgreicher Dampfsterilisation.

**Istruzioni per l'uso:**  
Posizionare l'indicatore all'interno di ogni confezione da sterilizzare. Il colore vira al verde dopo il successo del ciclo di sterilizzazione a vapore



HENRY SCHEIN®

## EMULATING INDICATOR FOR STEAM STERILISER, CLASS 6

Indicador químico para esterilizador de vapor, Clase 6

Indicateurs chimiques à changement de couleur, classe 6

HS-Chemischer Indikator zur Überwachung des Sterilisationsprozesses, Klasse 6

Integratori chimici a variazione cromatica per sterilizzazione a vapore, Classe 6


988-0811

Distributed by (in US only)  
HENRY SCHEIN INC.  
125 DURYEA ROAD  
MELVILLE, NY 11747 USA

HENRY SCHEIN U.K. HOLDINGS LTD.  
MEDICAL HOUSE, CANTONMENT CREEK  
GILLINGHAM BUSINESS PARK  
GILLINGHAM, ME8 0SB U.K.  
www.henryscheinbrand.com  
Rev.2014/11

100 Strips (200 Tests)

EN ISO 11140-1, Class 6

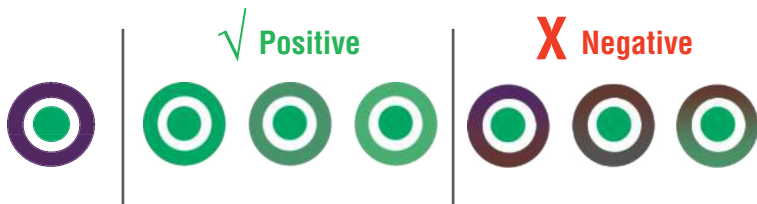

30

30



30